

Hoe toe te passen: Procedure maskers

Het wordt aanbevolen het masker elke 3 uur te vervangen



1

Was/reinig de handen



2

Zorg ervoor dat de Medline-stempel naar buiten wijst en dat de aanpasbare band bovenaan zit



3

Plaats de lussen achter de oren en bedek deze met de muts



4

Vorm de band naar de brug van uw neus



5

Zorg ervoor dat de plooien volledig zijn uitgevouwen om neus en mond te bedekken



6

Gebruik geschikte oogbescherming wanneer er kans is op spatten



7

Na gebruik het masker onmiddellijk verwijderen en weggooien



8

Gooi het masker op de juiste manier weg



9

Was je handen na het verwijderen van het masker

Voor meer informatie over chirurgische maskers, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of bezoek ons op www.medline.eu