

# Forma de aplicação: Máscaras de procedimentos

É recomendável trocar a máscara a cada 3 horas



1 Lavar/limpar as mãos



2 Certifique-se de que o carimbo da Medline fica voltado para fora e que o clip adaptável fica voltado para cima



3 Colocar os elásticos atrás das orelhas e cobrir com a touca ou gorro



4 Adaptar o clip à cana do nariz



5 Garantir que as pregas estão totalmente estendidas para cobrir o nariz e a boca



6 Se existir risco de salpicos, utilizar óculos de proteção adequados



7 Após a utilização, retirar e eliminar a máscara imediatamente



8 Eliminar a máscara corretamente



9 Lavar as mãos depois de eliminar a máscara

**Para ficar a saber mais sobre máscaras de intervenção,** entre em contacto com o gestor de conta Medline ou consulte [medline.eu/pt](http://medline.eu/pt)

