

# Instrucciones de uso: Mascarillas quirúrgicas con gomas

Se recomienda cambiar la mascarilla después de 3 horas de uso continuado



1

Lávese las manos



2

Asegúrese de que el logo de Medline queda hacia fuera y la banda adaptable hacia arriba



3

Coloque las tiras detrás de las orejas y cúbralas con el gorro



4

Ajuste la banda al puente de su nariz



5

Asegúrese de que los pliegues están totalmente abiertos y cubren nariz y boca



6

Si existe riesgo de salpicaduras, utilice la protección ocular adecuada



7

Una vez utilizada, retire la mascarilla y deséchela de inmediato



8

Deseche la mascarilla adecuadamente



9

Lávese las manos una vez desechada la mascarilla

**Para obtener más información sobre mascarillas para procedimientos,** póngase en contacto con su representante comercial de Medline o visite [es.medline.eu](https://es.medline.eu)