

# Anwendung: Atemschutzmasken

Die Atemschutzmasken müssen hinsichtlich der Passform den vor Ort geltenden Richtlinien entsprechen. Die Maske bei Verunreinigung oder alle acht Stunden wechseln.



**1**  
Die Hände nach den geltenden Hygienerichtlinien reinigen.



**2**  
Halten Sie die Maske wie dargestellt, die Bänder müssen frei und der Nasenbügel oben sein.



**3**  
Die Atemschutzmaske über Mund und Nase positionieren.



**4**  
Das obere Gummiband über den Hinterkopf ziehen.



**5**  
Das untere Gummiband am Nackenansatz platzieren.



**6**  
Passen Sie den Metallbügel der Nasenform an.



**7**  
Kräftig ein und ausatmen, wenn an den Rändern Luft austritt, die Position anpassen.



**8**  
Bei Spritzgefahr einen geeigneten Augenschutz verwenden.



**9**  
Die Maske nach dem Gebrauch abnehmen und ordnungsgemäß entsorgen.



**10**  
Nach der Entsorgung der Maske die Hände waschen.

**Für weitere Informationen zu unseren Atemschutzmasken** können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de)