

Instrucciones de uso: Mascarillas de protección respiratoria

Según las políticas locales, es recomendable o puede ser obligatorio validar las mascarillas de protección respiratoria mediante un test FIT. Cambie la mascarilla si se contamina o cada 8 horas de uso continuado.



1

Lávese las manos



2

Asegúrese de que la banda metálica queda arriba y las cintas cuelgan hacia abajo



3

Mantenga la mascarilla respiratoria sobre boca y nariz



4

Coloque la cinta superior a la altura de la coronilla



5

Coloque la cinta inferior en la base del cuello



6

Ajuste la banda metálica al puente de la nariz



7

En esta posición, coloque las dos manos sobre la mascarilla e inspire con fuerza. Si hay fugas de aire alrededor de los bordes, reposicione para conseguir un mejor ajuste.



8

Si existe riesgo de salpicaduras, utilice la protección ocular adecuada



9

Una vez utilizada, retire la mascarilla y deséchela adecuadamente



10

Lávese las manos una vez desechada la mascarilla

Para obtener más información sobre mascarillas respiratorias, póngase en contacto con su representante comercial de Medline o visite www.medline.eu/es