

Comment utiliser un masque respiratoire

Tous les masques respiratoires doivent être en conformité avec les normes locales. Changer de masque si celui-ci est contaminé ou après 8h de port consécutif.



1
Lavez-vous les mains avant de toucher le masque



2
Assurez-vous que la bande métallique est placée vers le haut et que les liens pendent en dessous



3
Tenez le masque respiratoire contre le visage en en couvrant le nez et la bouche



4
Placez l'élastique de maintien supérieur sur le dessus de la tête



5
Placez l'élastique de maintien inférieur à la base du crâne



6
Conformez la bande à l'arête de votre nez



7
Placez les deux mains sur le masque respiratoire, puis inspirez vigoureusement sans modifier sa position. Si de l'air fuit sur les bords, repositionnez-le pour un meilleur ajustement.



8
En cas de risque de projections, utilisez une protection oculaire appropriée



9
Après utilisation, retirer le masque avec précaution, et le jeter



10
Lavez-vous les mains après avoir jeté le masque

Pour plus d'informations sur les masques respiratoires, merci de contacter votre Responsable Commercial Medline ou consultez notre site Internet sur : www.medline.eu/fr