

Hoe toe te passen: Ademhalingsmaskers

Alle ademhalingsmaskers moeten FIT getest worden in overeenstemming met het lokale beleid. Gebruik een nieuw masker wanneer het besmet raakt of om de 8 uur.



1 Was/reinig de handen



2 Zorg ervoor dat de metalen band aan de bovenzijde zit en de bandjes naar beneden hangen



3 Houd het ademhalingsmasker over je mond en neus



4 Plaats de bovenste band ter hoogte van de kruin



5 Plaats de onderste band aan de basis van de nek



6 Pas de neusclip aan naar de brug van uw neus



7 Houd beide handen over het ademhalingsmasker zonder de positie ervan te veranderen en adem krachtig in. Positioneer het masker opnieuw als er lucht rond de randen lekt, voor een betere pasvorm.



8 Gebruik geschikte oogbescherming wanneer er kans is op spatten



9 Verwijder na gebruik het masker en gooi het op de juiste manier weg



10 Was je handen na het verwijderen van het masker

Voor meer informatie over chirurgische maskers, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of bezoek ons op www.medline.eu