

Anwendung: OP-Masken

Es wird empfohlen, die Maske alle drei Stunden zu wechseln.



1
Die Hände nach den geltenden Hygienerichtlinien reinigen.



2
Der Medline Aufdruck befindet sich an der Außenseite und der formbare Nasenbügel im oberen Maskenbereich.



3
Den Nasenbügel an Ihren Nasenrücken anpassen.



4
Das obere Band am Hinterkopf zusammenbinden.



5
Das untere Band im Nackenbereich zusammenbinden.



6
Die Maske muss ganz entfaltet sein, sodass Nase und Mund bedeckt sind.



7
Bei Spritzgefahr einen geeigneten Augenschutz verwenden.



8
Nach dem Gebrauch die Maske durch Aufreißen der Bänder entfernen. Bei nicht Benutzung, entfernen Sie die Maske vom Hals.



9
Die Maske ordnungsgemäß entsorgen.



10
Nach der Entsorgung der Maske die Hände waschen.

Für weitere Informationen zu unseren OP-Masken können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de

Zum Schutz vor infektiösen Erregern in chirurgischen Einrichtungen verwenden.

Wir behalten uns das Recht vor, Fehler in dieser Broschüre zu korrigieren. © 2020 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, Inc. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, USA. ML991-DE 04/2020