

Comment utiliser un masque chirurgical

Il est recommandé de changer de masque toutes les 3 heures



1
Lavez-vous les mains avant de toucher le masque



2
Assurez-vous que le logo Medline soit tourné vers l'extérieur et que la barrette nasale soit placée en haut



3
Conformez la barrette nasale à l'arête de votre nez



4
Attachez les liens supérieurs sur le dessus de la tête



5
Attachez les liens inférieurs à la base du crâne



6
S'assurer que les plis soient complètement ouverts pour couvrir le nez, la bouche et le menton



7
En cas de risque projections, utilisez une protection oculaire appropriée



8
Après utilisation, retirez le masque en déchirant les liens. Ne laissez pas le masque reposer sur votre cou



9
Jeter le masque dans la poubelle appropriée



10
Lavez-vous les mains après avoir jeté le masque

Pour plus d'informations sur les masques chirurgicaux, merci de contacter votre Responsable Commercial Medline ou consultez notre site Internet sur : www.medline.eu/fr