

Come indossare le mascherine chirurgiche

Si raccomanda di cambiare mascherina ogni 3 ore



1 Lavare/pulire le mani



2 Accertarsi che la stampa Medline sia rivolta verso l'esterno e che la barretta conformabile sia in alto



3 Modellare la barretta in base alla forma del naso



4 Legare i lacci superiori all'altezza della nuca



5 Legare i lacci inferiori dietro al collo.



6 Assicurarsi che la mascherina sia stata completamente aperta ed estesa così da coprire naso e bocca



7 In caso di rischio di schizzi, si utilizzi apposite protezioni per gli occhi



8 Dopo l'utilizzo, rimuovere la mascherina staccando i lacci. La mascherina non deve rimanere posizionata sul collo.



9 Smaltire correttamente la mascherina



10 Lavarsi le mani dopo aver smaltito la mascherina

Per saperne di più sulle mascherine chirurgiche, contattate il vostro account manager Medline o visitate www.medline.eu/it