

Hoe toe te passen: Chirurgische Maskers

Het wordt aanbevolen het masker elke 3 uur te vervangen



1

Was/reinig de handen



2

Zorg ervoor dat de Medline-stempel naar buiten wijst en dat de aanpasbare band bovenaan zit



3

Vorm de band naar de brug van uw neus



4

Strik de bovenste bandjes ter hoogte van uw kruin



5

Strik de onderste bandjes onderaan uw nek



6

Zorg ervoor dat de plooiën volledig zijn uitgevouwen om neus en mond te bedekken



7

Gebruik geschikte oogbescherming wanneer er kans is op spatten



8

Verwijder na gebruik het masker door de bandjes kapot te scheuren.



9

Gooi het masker op de juiste manier weg



10

Was je handen na het verwijderen van het masker

Voor meer informatie over chirurgische maskers, kunt u contact opnemen met uw accountmanager of bezoek ons op www.medline.eu