

Forma de aplicação: Máscaras cirúrgicas

É recomendável trocar a máscara a cada 3 horas



1 Lavar/limpar as mãos



2 Certifique-se de que o carimbo da Medline fica voltado para fora e que o clip adaptável fica voltado para cima



3 Adaptar o clip à cana do nariz



4 Atar o atilho superior à parte de cima da cabeça



5 Atar o atilho inferior à base do pescoço



6 Certifique-se de que as pregas estão totalmente estendidas para cobrir o nariz e a boca



7 Se existir risco de salpicos, utilizar óculos de proteção adequados



8 Após a utilização, retire a máscara rasgando os atilhos. Não deixar a máscara repousar no pescoço



9 Eliminar a máscara corretamente



10 Lavar as mãos depois de eliminar a máscara

Para ficar a saber mais sobre máscaras cirúrgicas, entre em contacto com o gestor de conta Medline ou consulte www.medline.eu/pt