

Instrucciones de uso: Mascarillas quirúrgicas con cintas

Se recomienda cambiar la mascarilla después de 3 horas de uso continuado



1

Lávese las manos



2

Asegúrese de que el logo de Medline queda hacia fuera y la banda moldeable hacia arriba



3

Ajuste la banda al puente de su nariz



4

Átese la tira superior en la coronilla



5

Átese la tira inferior en la base del cuello



6

Asegúrese de que los pliegues están totalmente abiertos y cubren nariz y boca



7

Si existe riesgo de salpicaduras, utilice la protección ocular adecuada



8

Después de su uso, retire la mascarilla rompiendo las tiras. No deje que la mascarilla toque su cuello



9

Deseche la mascarilla adecuadamente



10

Lávese las manos una vez desechada la mascarilla

Para obtener más información sobre mascarillas quirúrgicas, póngase en contacto con su representante comercial de Medline o visite es.medline.eu

Se recomienda su uso para protegerse de agentes infecciosos en quirófano

© 2020 Medline es una marca comercial registrada de Medline Industries, Inc. One Medline Place, Mundelein, IL 60060, USA. ML991_ES 09/2020