

## EINLEGEN VON MED-SOFT INNENBEHÄLTERN

Nachstehend finden Sie die Anweisungen für das korrekte Einlegen der MED-SOFT Innenbehälter in den Außenbehälter.



**Befestigen Sie den Mehrweg-Außenbehälter vor dem Einführen des weichen Innenbehälters immer an einer Halterung, damit der Behälter nicht fällt. Achten Sie darauf, dass der Außen- und Innenbehälter über dasselbe Fassungsvermögen verfügen.**

**1**

Nehmen Sie den Innenbehälter aus der Verpackung. Nutzen Sie dazu die Perforation.



Breiten Sie den Innenbehälter aus, indem Sie ihn oben und unten auseinander ziehen.



**2**

Um das Einlegen des Innenbehälters in den Außenbehälter zu erleichtern, schließen Sie den TANDEM-Anschluss (mit der Kappe oder einem Finger), damit die Luft im Innenbehälter bleibt.



**3**

Drücken Sie auf den Deckel des Innenbehälters, um zu prüfen, ob dieser sicher im Außenbehälter versiegelt ist.



**Ist das Vakuum auf ON geschaltet, hilft das dabei, den Deckel des Innenbehälters mit dem Außenbehälter zu versiegeln.**

**4**

Prüfen Sie den Vakuumanschluss an der roten Halterung. Befestigen Sie den roten Schlauch von der Vakuumquelle am Vakuumanschluss des Deckels des weichen Innenbehälters. Falls es nicht bereits eingeschaltet ist, stellen Sie das Vakuum auf ON.



**5**

Halten Sie Ihren Finger auf die Öffnung des Patientenanschlusses, um den Innenbehälter mittels des Vakuums sicher im Außenbehälter zu versiegeln.



**6**

Schließen Sie die Patientenschläuche am Patientenanschluss an.



**Denken Sie daran, das Vakuum zu deaktivieren, wenn keine Absaugung erforderlich ist.**

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: [www.medline.eu/de](http://www.medline.eu/de).