

MED-SOFT

Procedura di inserimento della cartuccia

Di seguito sono riportate le istruzioni per inserire correttamente la cartuccia di MED-SOFT nel suo contenitore riutilizzabile (canister).



Fissare sempre il canister esterno riutilizzabile al supporto prima di inserire la cartuccia morbida al suo interno onde evitare cadute accidentali. Assicurarsi di utilizzare sempre un canister ed una cartuccia della stessa capacità e volume.

1

Rimuovere la cartuccia dal suo imballo tramite l'apertura facilitata.



Stendere la cartuccia tirandola sia dalla parte superiore che da quella inferiore.



Portarla in posizione completamente distesa.



2

Per facilitare l'inserimento della cartuccia nel contenitore, chiudere la porta TANDEM (con il tappo o il dito) per mantenere l'aria al suo interno.



3


Premere sui bordi del coperchio per assicurarsi che la cartuccia si chiuda ermeticamente sul contenitore esterno.



Quando la levetta del vuoto è posizionata su ON, l'aspirazione aiuta a sigillare la cartuccia con il canister.

4

Controllare il collegamento del vuoto sotto la staffa rossa. Collegare il tubo rosso del vuoto alla porta del vuoto sulla cartuccia morbida. Attivare il vuoto posizionando la levetta su ON.

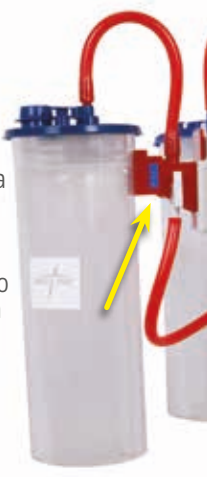

5

Posizionare il dito sul connettore a L per sigillare in modo sicuro la cartuccia ed il canister aiutandosi con la pressione del vuoto.



6

Collegare il tubo paziente sul connettore a L della porta paziente.



Ricordarsi di disattivare il vuoto quando non si necessita di aspirazione.

Per ulteriori informazioni sui sistemi di aspirazione di Medline, si prega di contattare il vostro account manager o visitare il sito: www.medline.eu/it