

MED-SOFT

Liner plaatsen

Hieronder vindt u de onderstaande instructies voor het correct plaatsen van de MED-SOFT liner in de canister.



Zorg ervoor dat de reusable canister altijd is bevestigd aan een houder voordat de liner wordt geplaatst, zodat de canister niet kan vallen. Zorg ervoor dat u altijd een canister en liner gebruikt met dezelfde capaciteit.

1

Verwijder de liner uit de verpakking via de gemakkelijke opening.



Ontplooi de liner door de boven en onderkant uit elkaar te trekken.



Zorg voor een rechte ontplooiing van de liner.



2

Om het plaatsen van de liner te vereenvoudigen, sluit u de TANDEM poort (met dop of vinger) zodat de lucht in de liner blijft.



3

Druk op de deksel van de liner om er zeker van te zijn dat deze goed om de canister is gesloten.



Als het vacuüm aanstaat is het eenvoudiger om de deksel goed om de canister te sluiten.

4

Controleer de vacuüm aansluiting onder de rode beugel. Sluit de rode slang van de vacuüm bron op de vacuüm poort op het deksel van de liner aan. Zet het vacuüm aan.



5

Plaats uw vinger op de L-connector zodat de liner zich goed om de canister kan sluiten met behulp van het vacuüm.



6

Sluit de zuigslang op de L-connector aan de patiënten poort aan.



Vergeet niet het vacuüm af te sluiten wanneer u de zuigpot niet gebruikt.

Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over Medline ASPIRATIESYSTEMEN, of bezoek ons op: www.medline.eu/nl