

# Introdução da Bolsa MED-SOFT

Por favor, siga as instruções para introduzir corretamente a bolsa MED-SOFT no recipiente.



**Certifique-se que o recipiente reutilizável está seguro a um suporte, antes de introduzir a bolsa maleável, para que o recipiente não caia. Certifique-se que utiliza sempre um recipiente e bolsa com a mesma capacidade.**

1

Retire a bolsa da embalagem através da abertura fácil.



Estique a bolsa, puxando a parte superior e inferior para fora em sentidos opostos.



Endireite a bolsa.



2

Para facilitar a introdução da bolsa no recipiente, feche a porta TANDEM (com a tampa ou com o dedo) para manter o ar na bolsa.



3

Pressione a tampa da bolsa para baixo para garantir que a bolsa fica bem selada ao recipiente exterior.



Quando o vácuo está em ON, este ajuda a selar a tampa da bolsa ao recipiente.

4

Inspeccione a conexão de vácuo debaixo do suporte vermelho. Ligue o tubo vermelho da fonte de vácuo à porta de vácuo da tampa da bolsa maleável. Ligue o vácuo na posição ON.



5

Coloque o dedo no conector em «L» para selar bem a bolsa no recipiente exterior com o vácuo.



6

Ligue o tubo do paciente ao conector em «L» à porta do doente.



Lembre-se de desativar o vácuo se não precisar de aspiração.

Para obter mais informações sobre os sistemas de aspiração Medline, entre em contacto com o seu representante comercial ou visite o nosso site [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)