

MED-SOFT

Réarmement de l'aspiration

Veillez trouver ci-dessous, les instructions pour le redémarrage de l'aspiration après l'arrêt prématuré du système de gestion des fluides MED-SOFT. Cela signifie que le vide est actif, mais que l'aspiration ne fonctionne pas.

1

Vérifier que le bocal est fixé et dans une position verticale.



2

Déconnecter la tubulure (rouge) de vide du site VACUUM quelques secondes (la valve va redescendre).




3

Reconnecter la tubulure sur le site VACUUM; l'aspiration va reprendre.



POURQUOI CETTE FONCTIONNALITE ?

Le site vide est protégé par la présence d'une valve mécanique et d'un filtre antibactérien. Ces deux fonctionnalités simples et efficaces protègent le circuit de vide de votre établissement contre les remontées de liquides et d'aérosols.

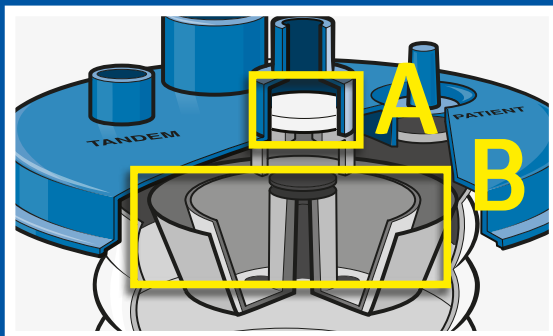

- A. Le filtre antibactérien contre les aérosols
- B. La valve mécanique qui en cas de chocs ou renversement du bocal se déclenche et arrête l'aspiration



Toujours utiliser une poche souple dans un bocal réutilisable fixé sur son support en position verticale.