

MED-SOFT

Neustart der Absaugung

Nachstehend finden Sie Anweisungen für den Neustart der Absaugung, nachdem sich das MED-SOFT Absaugsystem vorzeitig abgeschaltet hat. Dabei steht das Vakuum auf der Position EIN, die Absaugung arbeitet jedoch nicht.

1

Prüfen Sie, ob sich der Behälter fest in einer vertikalen Position befindet.



2

Trennen Sie den roten Vakuumschlauch vom Vakuumanschluss, während das Vakuum auf der Position ON steht (das Vakuumventil wird dadurch in die offene Stellung zurückbewegt).




3

Schließen Sie den roten Vakuumschlauch wieder an den Vakuumanschluss an. Die Absaugung startet erneut.



WOZU DIENT DIESE FUNKTION?

Der Vakuumanschluss ist durch ein Absperrventil und einen antibakteriellen Filter geschützt. Diese beiden einfachen und effizienten Funktionen schützen die Vakuumquelle vor dem Ansaugen von Flüssigkeit und Aerosolen.

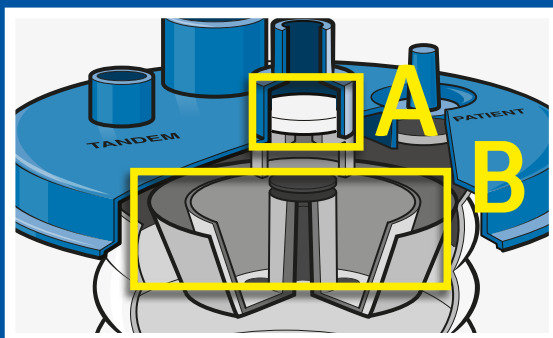

- A. Antibakterieller Filter gegen Aerosole.
- B. Vakuumventil zum Abstellen der Absaugung, wenn der Behälter voll ist, einen Stoß erhalten hat oder sich plötzlich aus seiner vertikalen Position bewegt.



Nutzen sie die flexiblen MED-SOFT Innenbehälter immer in einem gut fixierten Außenbehälter.

Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.