

MED-SOFT

Riavviamento aspirazione

Seguire attentamente le istruzioni operative riportate sotto per avviare nuovamente l'aspirazione dopo un'interruzione di funzionamento prematura del Sistema di Aspirazione Chirurgica MED-SOFT. Ossia quando l'interruttore del vuoto è posizionato su ON, ma l'aspirazione non funziona.

1

Controllate che il canister sia in posizione verticale e ben fissato al supporto.



2

Con il selettore di aspirazione posizionato su ON, disconnettere il tubo rosso collegato alla porta del vuoto della cartuccia morbida (la valvola meccanica del troppo pieno Shut-off, si muoverà tornando alla posizione di apertura, cioè posizionata in basso).




3

Connettere nuovamente il tubo rosso alla porta del vuoto della cartuccia morbida, quindi l'aspirazione partirà di nuovo.



PERCHE' PUO' ACCADERE CHE L'ASPIRAZIONE SI BLOCCHI IMPROVVISAMENTE?

La porta del vuoto è protetta sia da una valvola meccanica Shut-off che da un filtro antibatterico. Queste due semplici caratteristiche assicurano con la massima efficienza che i liquidi aspirati non tornino indietro inquinando la sorgente del vuoto presente nella vostra Struttura sanitaria.

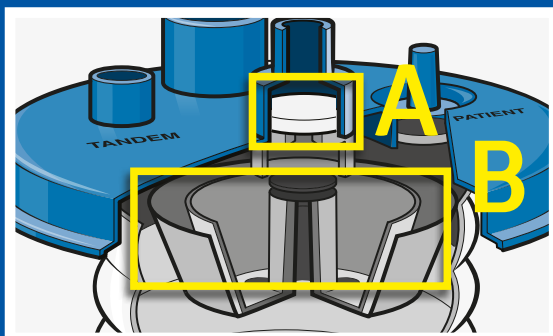

- A. Il Filtro Antibatterico serve per trattenere gli aerosol
- B. La Valvola Shut-off interrompe l'aspirazione se il canister è urtato accidentalmente oppure inclinato improvvisamente in seguito a caduta o errato posizionamento



Utilizzare sempre le cartucce morbide inserendole correttamente nel canister rigido riutilizzabile fissato su appositi supporti.

Per ulteriori informazioni sul Sistema di Aspirazione Medline, contattate il nostro responsabile di zona o visitate il nostro sito aziendale: www.medline.eu/it