

MED-SOFT

Aspiratie opnieuw opstarten

Hieronder vindt u de instructies voor het opnieuw starten van de aspiratie na vroegtijdige uitschakeling van het MED-SOFT Fluid managementsysteem. Dit betekent dat het vacuüm ingeschakeld is, maar de zuigkracht werkt niet.

1 controleer of de canister in een vaste verticale positie is bevestigd.



2 Koppel de rode vacuumslang los van de vacuumpoort terwijl het vacuüm aanstaat (de afsluitklep zal terug gaan naar de open positie).




3 Sluit de rode vacuumslang opnieuw aan op de vacuumpoort. Vervolgens zal de zuigkracht opnieuw starten.



WAAROM BESTAAT DEZE FUNCTIE ?

De vacuumpoort wordt beschermd door een afsluitklep en een antibacteriële filter. Deze twee eenvoudige en efficiënte functies verhinderen dat de vloeistof terug stroomt naar de zuigbron van uw instelling.

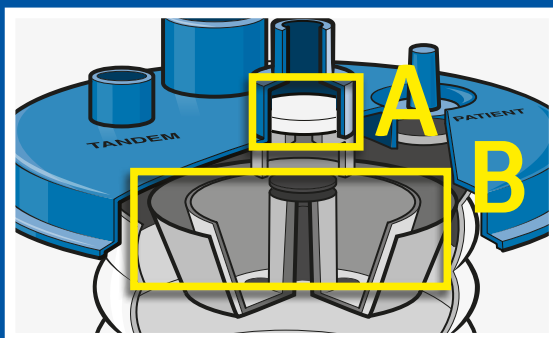

- A. Antibacteriële filter tegen aërosolen
- B. afsluitklep om de zuigkracht af te sluiten als de canister eruit wordt gestoten of plotseling uit de verticale positie verplaatst



Plaats altijd een zachte liner in een vaste, herbruikbare buitenste canister.

Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over Medline ASPIRATIESYSTEMEN, of bezoek ons op: www.medline.eu/nl