

# MED-SOFT

## Reiniciar a Aspiração

Seguem-se as instruções para reiniciar a aspiração após o encerramento prematuro do Sistema de Gestão de Fluidos MED-SOFT. Ou seja, quando o vácuo está ligado em ON, mas a aspiração não funciona.

**1** Verifique se o recipiente se encontra numa posição vertical e fixa.



**2** Com o vácuo em ON, desligue o tubo de vácuo vermelho da porta de vácuo (a válvula de corte irá regressar à posição aberta).




**3** Volte a ligar o tubo de vácuo vermelho à porta de vácuo e a aspiração irá começar novamente.



## PORQUE É QUE EXISTE ESTA FUNCIONALIDADE?

A porta de vácuo está protegida por uma válvula de corte e por um filtro antibacteriano. Estas duas funcionalidades simples e eficientes evitam que o líquido entre na fonte de aspiração da sua unidade de saúde.

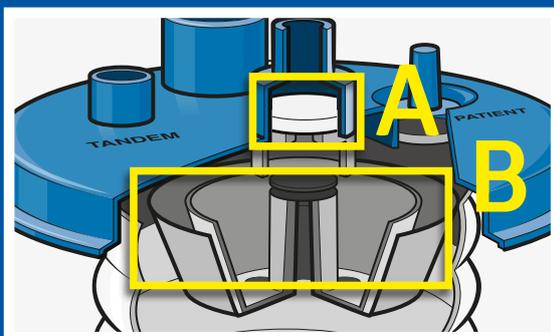

- A. Filtro antibacteriano contra aerossóis.
- B. Válvula de corte para desligar a aspiração se o recipiente sofrer um impacto ou se sair da sua posição vertical.



**Coloque sempre as bolsas num suporte fixo e reutilizável.**

Para obter mais informações sobre os sistemas de aspiração Medline, contacte o seu representante da Medline ou visite-nos em [www.medline.eu/pt](http://www.medline.eu/pt)