

MED-SOFT

Liner verwijderen

Hieronder vindt u de instructies voor het correct verwijderen van de MED-SOFT liner uit de canister.

- 1** Maak de aspiratieslang los van de patiënten poort. Sluit de patiënten poort met het afsluitdopje af.



Verwijder de L-connector en de patiënten aspiratieslang.

- 2** Zorg ervoor dat alle poorten naast de vacuümpoort afgesloten en verzegeld zijn.



Als u gebruik maakt van de tandenslang, ontkoppel deze dan van de patiënten poort en sluit deze met het afsluitdopje af.

- 3** Indien gelatine gel als stollingsmiddel toegevoegd moet worden, open dan de accessoire poort, voeg de juiste hoeveelheid gelatine toe en sluit de poort.



- 4** Ontkoppel de rode vacuümslang met de vacuüm poort en sluit deze veilig af met het afsluitdopje.



Wanneer je de rode vacuümslang loskoppeld, kan de liner uit de canister springen. Dit is normaal.

- 5** Sluit het vacuüm af.



- 6** Verwijder de liner uit de canister. Zorg ervoor dat geldende protocollen van het ziekenhuis en landelijke richtlijnen aangehouden worden, wanneer de liner en inhoud verwijderd worden.



Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over Medline ASPIRATIESYSTEMEN, of bezoek ons op: www.medline.eu/nl