

MED-SOFT

Extracción de la bolsa

A continuación indicaciones para retirar la bolsa MED SOFT del cánister de manera segura.

1

Desconecte el tubo de aspiración del puerto de paciente de la tapa de la bolsa y ciérrelo con su tapón.



Retire el conector en L junto con el tubo del paciente.

2

Asegúrese de que todos los puertos están cerrados con su tapón correspondiente antes de continuar.



Si está usando tubo tándem desconéctelo del puerto de paciente y tápelo con su tapón.

3

Si quiere añadir un agente solidificante hágalo abriendo el puerto de accesorios y ciérrelo una vez haya finalizado.



4

Desconecte el tubo rojo de vacío del puerto de vacío y tápelo con su tapón.



Cuando desconecte el tubo de vacío de la bolsa de aspiración ésta puede "saltar" de su posición facilitando su extracción, es normal.

5

Cierre la llave de vacío del cánister.



6

Ya puede retirar la bolsa del cánister. Asegúrese de que cumple con los protocolos de seguridad en cuanto al tratamiento de residuos.



Para más información acerca de los sistemas de aspiración quirúrgica Medline, por favor, póngase en contacto con su delegado comercial de zona o visítenos en: www.medline.eu/es