

# MED-SOFT

## Liner verwijderen

Hieronder vindt u de instructies voor het goed verwijderen van de MED-SOFT liner uit de canister.

- 1** Maak de aspiratieslang los van de patiëntenpoort. Sluit de patiëntenpoort met het afsluitdopje.



Verwijder de elleboogconnectie en de patiëntenaspiratieslang.

- 2** Zorg ervoor dat alle poorten naast de vacuumpoort afgesloten zijn en verzegeld.



Als u gebruik maakt van de tandenslang, deconnecteer deze van de patiëntpoort en sluit met het afsluitdopje.

- 3** Als u gelatine gel wil toevoegen, open de accessoirepoort, voeg de juiste hoeveelheid gelatine toe en sluit de poort.



- 4** Deconnecteer de rode vacuümslang met de vacuumpoort en sluit veilig af met het afsluitdopje.



Wanneer je de rode vacuümslang loskoppeld, kan de liner uit de canister springen. Dit is normaal.

- 5** Het vacuüm uitschakelen.



- 6** Verwijder de liner uit de canister. Zorg ervoor dat je aan de geldende protocollen van het ziekenhuis, lokale overheid en de federale vereisten voldoet wanneer je de liner en inhoud verwijderd.



Neem contact op met uw accountmanager voor meer informatie over Medline ASPIRATIESYSTEMEN, of bezoek ons op: [www.medline.eu/nl](http://www.medline.eu/nl)