

MED-SOFT

Insertion d'une poche

Veillez trouver ci-dessous les instructions pour insérer correctement la poche MED-SOFT dans le bocal.



Le bocal doit toujours être en position verticale et fixé sur son support. Toujours utiliser un bocal et une poche de même contenance.

1

Sortir la poche souple de son emballage en utilisant l'ouverture facile (encoche).



Etirer la poche.



Redonner forme à la poche.



2

Afin de faciliter l'insertion de la poche souple dans son bocal, fermer le site TANDEM (avec son bouchon ou le doigt pour créer une cartouche d'air dans la poche).



3

Appuyer sur le couvercle de la poche souple afin de positionner celle-ci sur le bocal.



Une fois le vide activé, la poche va se clipser hermétiquement au bocal.

4

Vérifier l'acheminement du vide au bocal.

Brancher la tubulure de vide rouge sur le site VACUUM de la poche.

Ouvrir le vide (robinet ON/OFF).



5

Placer le doigt sur le connecteur en L pour vérifier l'aspiration et clipser hermétiquement la poche au bocal grâce au vide.



6

Connecter la tubulure patient sur le connecteur en L du port patient.

Le système MED-SOFT est prêt.



Eviter de maintenir le vide ouvert, lorsque l'aspiration n'est pas utilisée.

Pour plus d'informations sur les systèmes d'aspiration Medline, veuillez contacter votre responsable commercial ou consultez notre site : www.medline.eu/fr