

Entfernung von MED-SOFT Innenbehältern

Nachstehend finden Sie die Anweisung für die ordnungsgemäße Entfernung der MED-SOFT Innenbehälter aus dem Außenbehälter.

1

Absaug-Verbindungsschlauch vom Patientenanschluss trennen. Anschluss mit der Kappe verschließen.



Winkelanschlussverbinder zusammen mit den Patientenschläuchen entfernen.

2

Achten Sie darauf, dass alle Anschlüsse mit Ausnahme des Vakuumanchlusses mit der Kappe verschlossen und versiegelt sind.



Wenn Sie den Tandemschlauch verwenden, trennen Sie diesen vom Patientenanschluss und verschließen ihn mit der Kappe.

3

Wenn Sie ein Geliermittel hinzufügen möchten, öffnen Sie den Zubehöranschluss, fügen die richtige Menge Geliermittel ein und schließen den Anschluss wieder.



4

Trennen Sie den roten Vakuumschlauch vom Vakuumanschluss und verschließen Sie diesen Anschluss sicher mit der Kappe.



Beim Trennen des Vakuumschlauchs kann der Innenbehälter einige Zentimeter aus ihrem Außenbehälter herauspringen.

5

Stellen Sie das Vakuum auf AUS.



6

Entfernen Sie den Innenbehälter aus dem Außenbehälter. Achten Sie bei der Entsorgung der Innenbehälter und des Inhalts auf die Einhaltung der Entsorgungsprotokolle Ihrer Einrichtung und der lokalen oder nationalen Richtlinien, die hierfür gelten.



Für weitere Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: www.medline.eu/de.