

# MED-SOFT

## RETRAIT D'UNE POCHE

Veillez trouver ci-dessous les instructions pour retirer correctement la poche MED-SOFT de son bocal. Gardez le vide actif jusqu'à l'étape 5.

- 1** Débrancher la tubulure d'aspiration du site patient puis obturer à l'aide du capuchon.



Retirer le connecteur en L avec la tubulure patient.

- 2** Vérifier que tous les autres sites exceptés le site VACUUM soient hermétiquement fermés.



En cas d'utilisation d'une tubulure tandem, déconnecter celle-ci du port patient et fermer le bouchon.

- 3** Pour ajouter un agent gélifiant, ouvrir le site accessoire, insérer la quantité correcte d'agent gélifiant puis refermer le site accessoire.



- 4** Débrancher la tubulure de vide rouge du site VACUUM et fermer hermétiquement ce site.



Lors du débranchement de la tubulure de vide rouge, la poche peut se libérer du bocal. C'est normal.

- 5** Fermer le vide.



- 6** Retirer la poche MED-SOFT du bocal. Eliminer la poche souple et son contenu suivant le protocole de l'établissement.



Pour plus d'informations sur les systèmes d'aspiration Medline, veuillez contacter votre responsable commercial ou consultez notre site : [www.medline.eu/fr](http://www.medline.eu/fr)