

## Procedura di rimozione cartuccia del MED-SOFT

Di seguito sono riportate le istruzioni per rimuovere correttamente la cartuccia di MED-SOFT dal suo contenitore riutilizzabile (canister).

- 1** Scollegare il tubo di aspirazione connesso alla porta paziente. Chiudere la porta con il tappo.



Rimuovere assieme al tubo di aspirazione anche il connettore angolare.

- 2** Assicurarsi che tutte le porte siano ben chiuse e sigillate, anche la porta del vuoto.



Se si utilizza il tubo tandem, scollegarlo dalla porta paziente e chiudere il tappo.

- 3** Se si desidera aggiungere un agente gelificante, aprire la porta accessoria, inserire la corretta quantità di agente gelificante e chiudere la porta.



- 4** Scollegare il tubo rosso dalla porta del vuoto e inserire bene il tappo predisposto.



Quando si scollega il tubo del vuoto, la cartuccia può saltare fuori dal canister. Questo fenomeno è normale.

- 5** Disattivare il vuoto posizionando la levetta su OFF.



- 6** Rimuovere la cartuccia morbida per aspirazione dal canister. Assicurarsi di smaltire le cartucce e il relativo contenuto osservando correttamente le procedure previste dalla struttura Ospedaliera in accordo con le normative vigenti di riferimento.



Per ulteriori informazioni sui sistemi di aspirazione di Medline, si prega di contattare il vostro account manager o visitare il sito: [www.medline.eu/it](http://www.medline.eu/it)