

Remoção da Bolsa MED-SOFT

Instruções para remover corretamente a bolsa MED-SOFT do recipiente.

1

Desligue o tubo de ligação de aspiração da porta do doente. Feche a porta com a tampa.



Remova o conector em cotovelo com a tubagem do doente.

2

Certifique-se de que todas as portas estão encerradas e seladas, excepto a porta de vácuo.



Se estiver a utilizar o tubo tandem, desligue-o da porta do doente e feche a tampa.

3

Se pretender adicionar um gelificante, abra a porta de acessórios, introduza a quantidade correta de gelificante e feche a porta.



4

Desligue o tubo de vácuo vermelho da porta de vácuo e encerre bem essa porta com a tampa.



Ao desligar o tubo de vácuo, a bolsa pode saltar para fora do recipiente. Isto é normal.

5

Desligue o vácuo (posição OFF).



6

Retire a bolsa de aspiração do recipiente exterior. Cumpra os protocolos do estabelecimento de saúde e os requisitos locais, estaduais ou federais na eliminação das bolsas e respetivos conteúdos.



Para obter mais informações sobre os sistemas de aspiração Medline, contacte o seu representante da Medline ou visite-nos em www.medline.eu/pt