

PARA CAMBIAR LA BOLSA DE FORMA SEGURA:

- 1.** Desconecte el tubo de paciente y tape el puerto de Paciente.
- 2.** Desconecte el tubo tándem. Si no hay tubo tándem desconecte el tubo rojo de vacío y tape el puerto de vacío.
- 3.** Desconecte el tubo rojo de vacío y tape el puerto de vacío de la bolsa llena.
- 4.** Cierre la llave de vacío del cánister.
- 5.** Retire la bolsa llena del cánister de una manera segura.