



PARA TROCAR A BOLSA DE FORMA SEGURA:

1. Desconectar o tubo do doente e tapar a porta do doente.
2. Desconectar o tubo tandem. Se não existe um tubo tandem, desconectar o tubo vermelho de vácuo e tapar a porta de vácuo.
3. Desconectar o tubo vermelho de vácuo e tapar a porta de vácuo da bolsa cheia.
4. Fechar a válvula de vácuo do recipiente.
5. Retirar a bolsa cheia do recipiente de forma segura.