



Anwendung des chirurgischen Rasierers



1

Aufsetzen des Scherkopfes

- Seitliche Markierung des Scherkopfes mit der ersten Markierung am Gerät ausrichten.
- Gerät vorschieben, bis es in Höhe der zweiten Gerätemarkierung hörbar einrastet.
- Sie werden ein „Klicken“ hören.



2

Handhabung


- Halten Sie den chirurgischen Rasierer wie einen Stift in der Hand.
- Die rutschfesten Griffseiten ermöglichen die Anwendung mit nur einer Hand.



3

Rasur (nass oder trocken)

- Vergewissern Sie sich, dass der Rasierer eingeschaltet ist (Position „ON“).
- In kurzen, behutsamen Strichen rasieren.
- Eine Rasur gegen die Haarwuchsrichtung erzielt das beste Ergebnis.

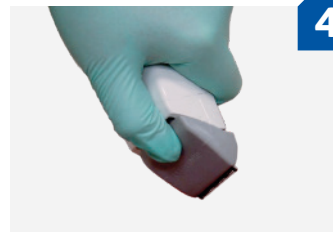

4

Entfernen des Scherkopfes

- Vergewissern Sie sich, dass der Rasierer ausgeschaltet ist (Position „OFF“).
- Leichten Druck mit dem Daumen im Bereich der Einkerbung auf der Rückseite des Scherkopfes ausüben.
- Scherkopf vorschieben und entsorgen.



5

Reinigung und Desinfektion

- Mit nicht-korrosivem Desinfektionsmittel desinfizieren.
- Unter fließendem Wasser reinigen.



6

Aufbewahrung

- Vergewissern Sie sich, dass der Rasierer ausgeschaltet ist (Position „OFF“).
- Stellen Sie den Rasierer in die Ladestation.

Für weitere Informationen zu diesem Produkt können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen: de.medline.eu