

Cómo usar la recortadora quirúrgica



1

Colocación de los cabezales

- Alinear la marca del cabezal con la línea superior de la recortadora.
- Deslizar el cabezal hacia abajo hasta que se alinee con la línea inferior de la recortadora.
- Se debería de escuchar un "clic".



2

Cómo sujetar la recortadora


- La recortadora debe sujetarse como si se tratara de un bolígrafo.
- La parte antideslizante del mango permite el control total de la recortadora y una maniobrabilidad total con una sola mano.



3

Cómo recortar sobre piel seca o húmeda

- Asegurarse de que la recortadora se encuentra en posición "ON" (encendido).
- Retirar el pelo/vello realizando movimientos cortos y suaves.
- Para obtener los mejores resultados, se recomienda que la dirección del movimiento se realice en contra de la dirección de crecimiento del pelo.

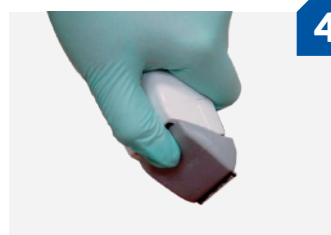

4

Cómo retirar los cabezales de corte

- Asegurarse de que la recortadora se encuentra en posición "OFF" (apagado).
- Colocar el pulgar sobre la zona texturizada en la parte trasera del cabezal.
- Empujar hasta que salga el cabezal.



5

Limpieza y desinfección

- Utilice una toallita anticorrosión universal para limpiar el producto tras su uso con cada paciente.
- Límpielo aclarándolo con agua tan pronto como sea posible tras cada uso.



6

Cómo guardar la recortadora

- Asegurarse de que la recortadora se encuentra en posición "OFF" (apagado).
- Colocarla en su estación de carga.

Para obtener más información sobre este producto, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite nuestra página web: es.medline.eu