



Tondeuse chirurgicale : Mode d'emploi



1

Fixation des lames

- Positionner la tondeuse au dessus de la lame au niveau de la 1ère encoche.
- Faire glisser la tondeuse sur la 2ème encoche.
- Un « clic » est entendu.



2

Prise en main de la tondeuse


- Tenez la tondeuse comme un stylo.
- Les bandes antidérapantes sur les flancs de la tondeuse assurent une meilleure tenue de la tondeuse.



3

Préparation préopératoire sur peau sèche ou humide

- Positionner l'interrupteur sur la position « ON ».
- Faire glisser la tondeuse parallèlement à la surface de la peau.
- Pour de meilleurs résultats, tondre à rebrousse poil.

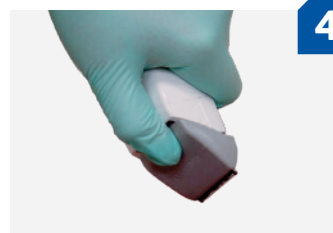

4

Retrait des lames

- Positionner l'interrupteur sur la position « OFF ».
- Placez votre pouce sur le point de pression prévu à cet effet.
- Poussez la lame pour la détacher.



5

Nettoyage et désinfection

- Nettoyez en rinçant à l'eau après chaque utilisation
- Nettoyer à l'aide d'une lingette désinfectante non corrosive.



6

Recharge

- S'assurer que l'interrupteur est sur la position « OFF ».
- Placez la tondeuse sur son support de charge.

Pour plus d'informations sur ce produit, merci de contacter votre responsable commercial Medline ou consultez notre site Web : fr.medline.eu