

Modalità di utilizzo: Clipper chirurgico



1

Montaggio delle lame

- Allineare il segno sulla lama alla linea superiore del clipper.
- Far scorrere la lama verso il basso finché non si allinea con la linea inferiore sul clipper.
- Si sentirà un Click



2

Come impugnare il clipper

- Impugnare il clipper come una penna
- Le impugnature laterali antiscivolo del manico consentono il pieno controllo del clipper e la manovrabilità con una sola mano.



3

Rasatura su cute asciutta o bagnata

- Assicurarsi che il clipper sia in posizione "ON".
- Utilizzare passaggi brevi e delicati per rimuovere i peli.
- Per ottenere migliori risultati, direzionare il taglio contropelo.



4

Rimozione della lama

- Assicurarsi che il clipper sia in posizione "OFF".
- Posizionare il pollice sulla cavità zigrinata presente sul retro della lama.
- Spingere finché la lama non si stacca.



5

Pulizia e disinfezione

- Pulire il manico con salviettine disinfettanti non corrosive ad ogni utilizzo.
- Pulire risciacquando con acqua il prima possibile dopo ogni utilizzo.



6

Conservazione del clipper

- Assicurarsi che il clipper sia in posizione "OFF".
- Posizionarlo sulla base di ricarica.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il vostro account manager o visitare il nostro sito: it.medline.eu

Questo prodotto è un dispositivo medico di classe I destinato ad essere utilizzato da personale sanitario.

Prima dell'utilizzo consultare le istruzioni e le avvertenze nell'apposita etichetta.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.

© 2020 Medline Industries, Inc. Medline è un marchio registrato di Medline Industries, Inc. ML285_IT 10/2020.