

Gebruiks- aanwijzing chirurgische tondeuse



1

Scheerkop bevestigen

- Lijn de markering op het mesje uit met de bovenste lijn op de tondeuse
- Schuif het mesje naar beneden tot deze op één lijn zit met de onderste lijn op de tondeuse.
- Het mesje klikt hoorbaar vast.



2

De tondeuse vasthouden

- Houdt de tondeuse vast als een pen.
- Het antislip handvat zorgt voor volledige controle over de tondeuse om deze met één hand te kunnen gebruiken.



3

Scheren van natte of droge huid

- Zorg dat de tondeuse op 'ON' staat.
- Maak korte, voorzichtige bewegingen om het haar te verwijderen.
- Voor de beste resultaten moet tegen de haargroeirichting in gescheed worden.



4

Mesjes verwijderen

- Zorg dat de tondeuse op 'OFF' staat.
- Plaats uw duim op de inkeping aan de achterzijde van het mesje.
- Duw totdat het mesje loslaat.



5

Schoonmaken en desinfecteren

- Veeg de tondeuse schoon met niet bijtende universele doekjes na gebruik bij een patiënt.
- Reinig de tondeuse door deze onder stromend water te houden zo snel mogelijk na elk gebruik.



6

De tondeuse bewaren

- Zorg dat de tondeuse op 'OFF' staat.
- Plaats het handvat op het oplaadstation.

Neem voor meer informatie over dit product contact op met uw Medline vertegenwoordiger of bezoek onze website: nl.medline.eu