

## Modo de utilização do tricotomizador cirúrgico



1

### Colocação das lâminas

- Alinhe a marca da lâmina com a linha superior do tricotomizador.
- Deslize a lâmina para baixo até ficar alinhada com a linha inferior do tricotomizador.
- Irá ouvir um clique.



2

### Segurar o tricotomizador

- Segure o tricotomizador como se fosse uma caneta.
- As pegas laterais antiderrapantes do punho permitem total controlo do tricotomizador e manobrabilidade com uma só mão.



3

### Cortar em pele molhada ou seca

- Certifique-se de que o tricotomizador se encontra na posição «ON».
- Faça passagens breves e delicadas para remover os pelos.
- Para obter os melhores resultados ao cortar, o movimento deve ser feito contra o sentido de crescimento do pelo.



4

### Remoção das lâminas

- Certifique-se de que o tricotomizador se encontra na posição «OFF».
- Coloque o polegar na reentrância texturada nas costas da lâmina.
- Empurre até a lâmina saltar fora.



5

### Limpeza e desinfeção

- Limpe o dispositivo com toalhetes universais não corrosivos entre cada utilização em doentes.
- Limpe-o passando-o por água assim que possível após cada utilização.



6

### Armazenamento do tricotomizador

- Certifique-se de que o tricotomizador se encontra na posição «OFF».
- Coloque-o na estação de carregamento.



Para mais informações sobre este produto, entre em contacto com o seu gestor de conta Medline ou consulte o nosso website: [medline.eu/pt](http://medline.eu/pt)