




Anleitung: NONELENS und NONEFRAME

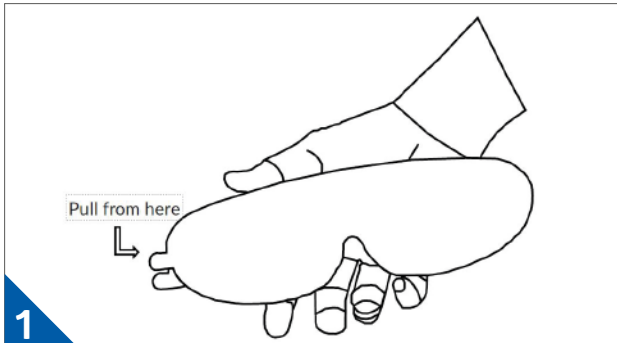


1 Entnehmen Sie die Wechselgläser aus dem Karton.

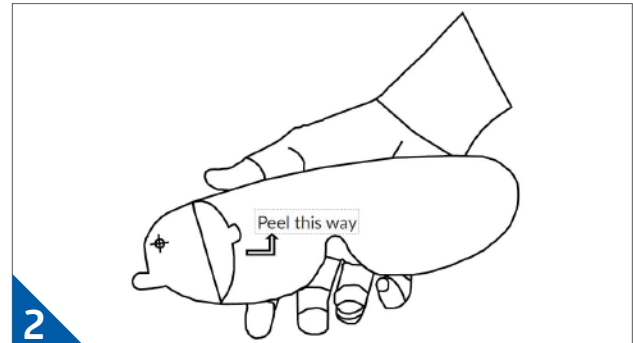


2 Ziehen Sie die innere Schutzfolie ab, indem Sie die obere Lasche zu sich ziehen.

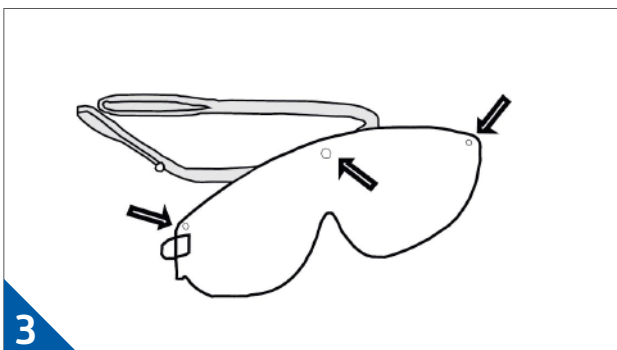

3 Positionieren Sie die Löcher über den Halterungen und lassen Sie sie per Klick in den entsprechenden wiederverwendbaren Rahmen einrasten (NONEFRAME). Die verbleibende Schutzfolie sollte sich auf der Außenseite befinden.

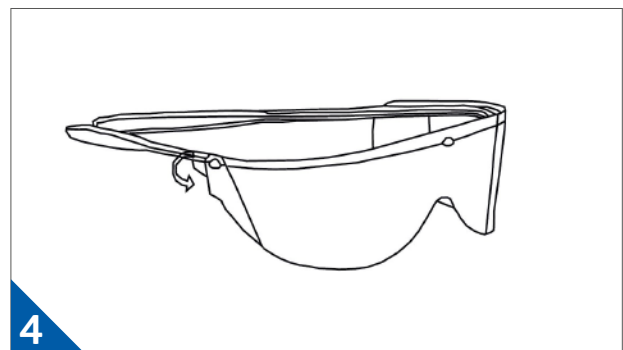

4 Entfernen Sie die äußere Schutzfolie wie in Schritt 2.

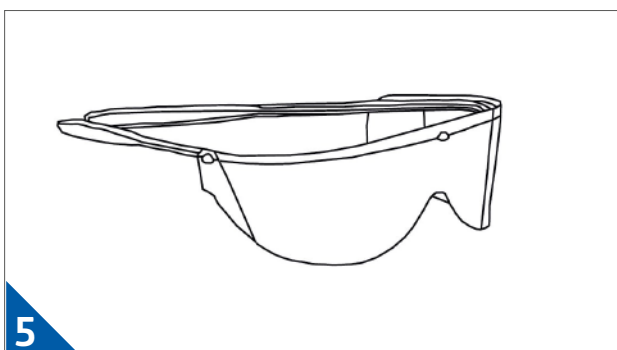

5 Die Brille kann nun getragen werden und ist frei von Kratzern und Fingerabdrücken.

Für mehr Informationen können Sie sich jederzeit gerne an Ihren Außendienstmitarbeiter wenden oder unsere Homepage besuchen:
de.medline.eu