




Preparación para el uso: NONELENS y NONEFRAME

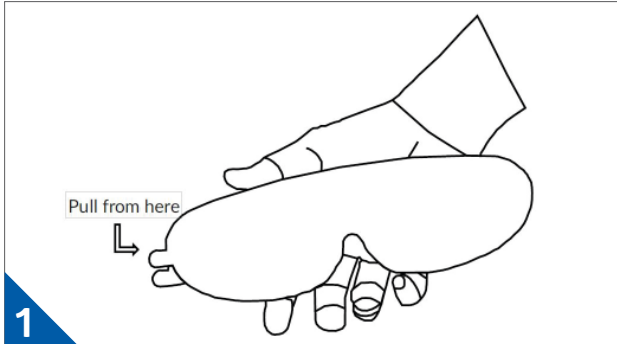


1 Saque la lente (NONELENS) del dispensador.

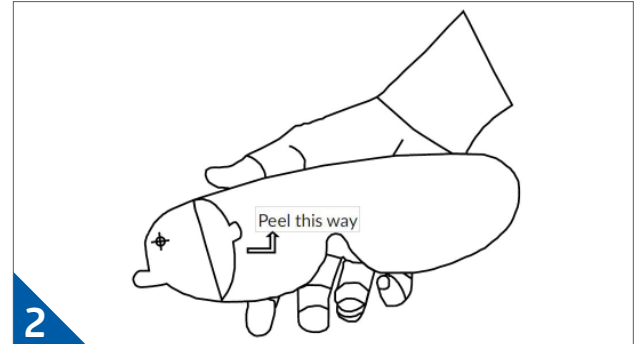


2 Despegue la película protectora interior tirando de la lengüeta superior hacia usted.

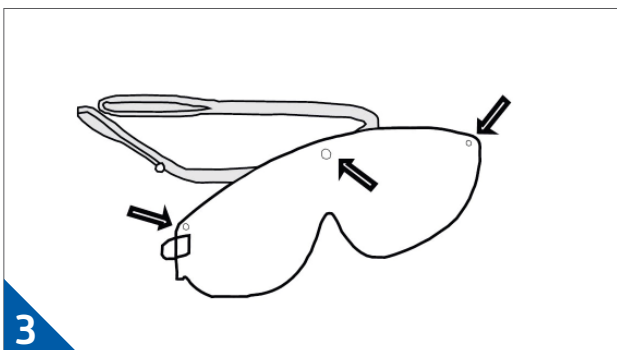

3 Enganche los tres agujeros superiores en la montura reutilizable correspondiente (NONEFRAME). El resto de la película protectora debe estar en el exterior.

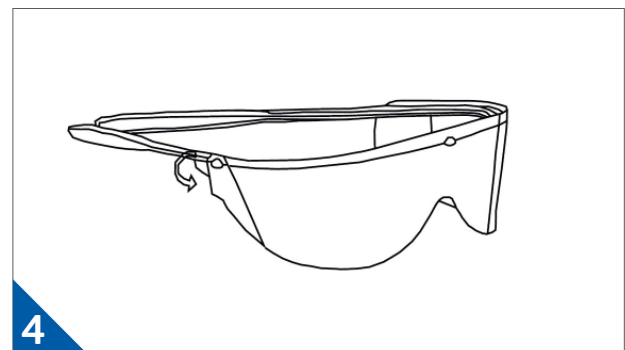

4 Retire la película exterior utilizando el mismo método que en el paso 2, y luego acople el seguro.

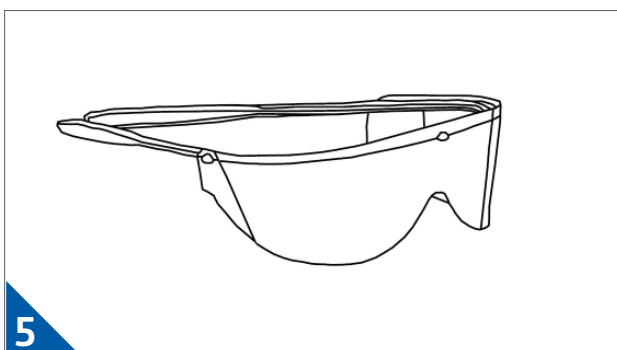

5 Su dispositivo ya se puede usar y no tiene arañazos.

Nota: Para limpiar o desinfectar su montura NONEFRAME, hágalo suavemente con Isopropanol líquido hasta 70% de concentración

Para saber más sobre las gafas de protección, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite [medline.eu/es](https://www.medline.eu/es)