




Indications d'utilisation : NONELENS et NONEFRAME

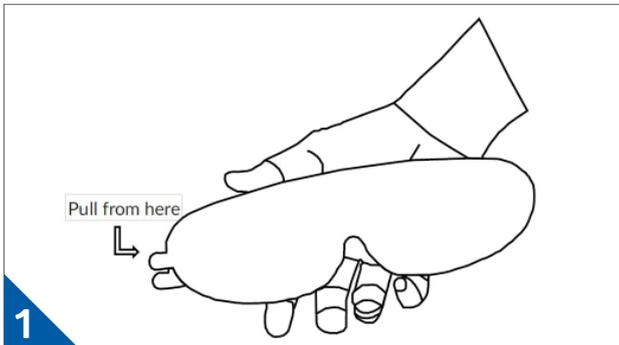


1 Retirez la lentille (NONELENS) du distributeur.

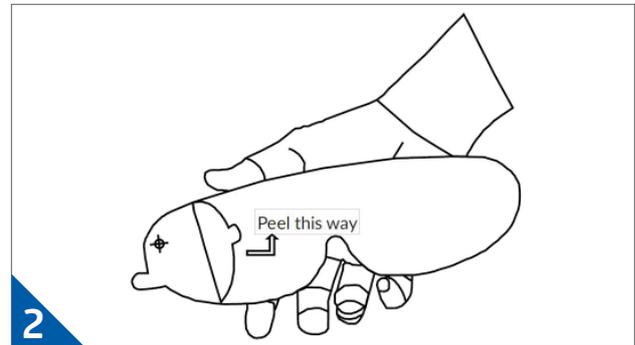


2 Décollez le film protecteur intérieur en tirant la languette supérieure vers vous.

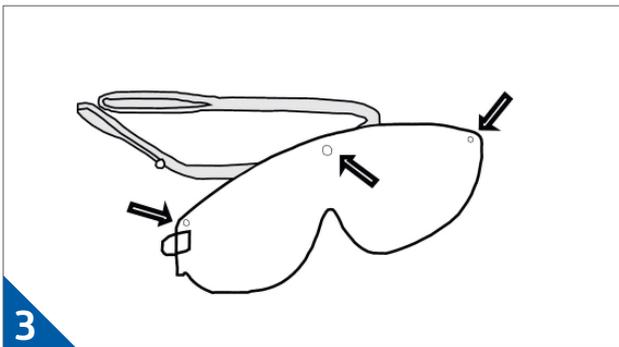

3 Clipsez trois trous dans le cadre réutilisable correspondant (NONEFRAME). Le reste du film doit se trouver à l'extérieur.

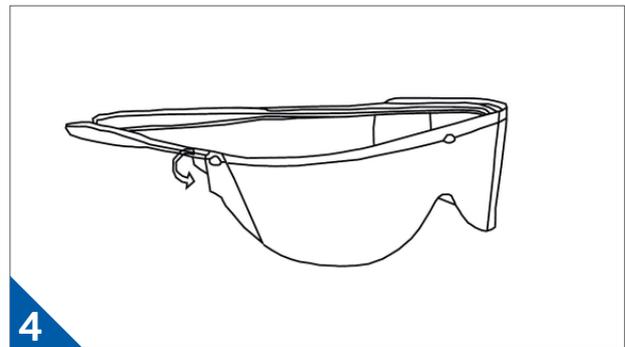

4 Retirez le film protecteur extérieur en utilisant la même méthode qu'à l'étape 2, puis fixez la visière.

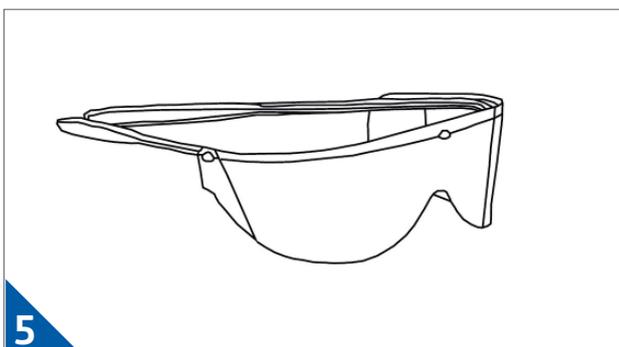

Vos lunettes protectrices peuvent maintenant être portées et sont exemptes de rayures.

Note : Pour nettoyer ou désinfecter vos NONEFRAME, essuyez les doucement avec un liquide pouvant contenir jusqu'à 70% d'isopropanol.

Pour en savoir plus sur nos masques et dispositifs de protection oculaire, contactez votre responsable commercial Medline ou visitez le site : [medline.eu/fr](https://www.medline.eu/fr)