




Vorbereiding voor gebruik: NONELENS en NONEFRAME

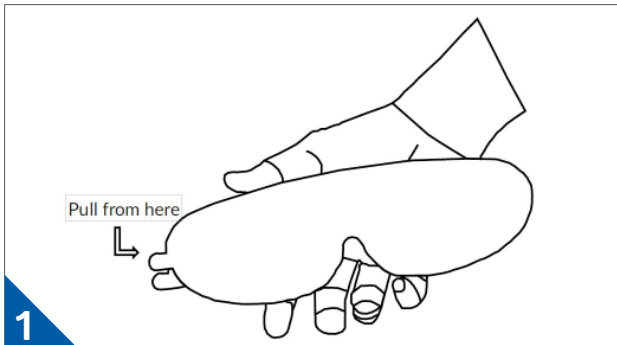


1
Haal de lens (NONELENS) uit de verpakking.

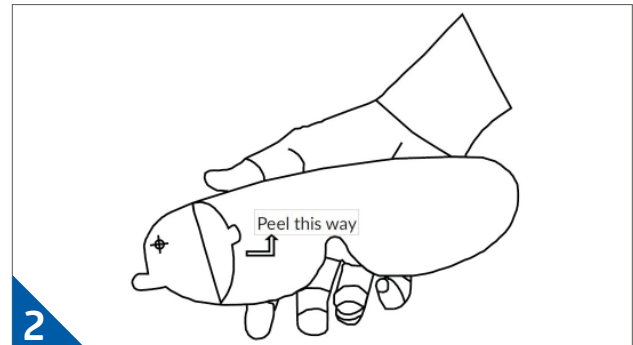


2
Verwijder de beschermfolie door het bovenste lipje naar je toe te trekken.

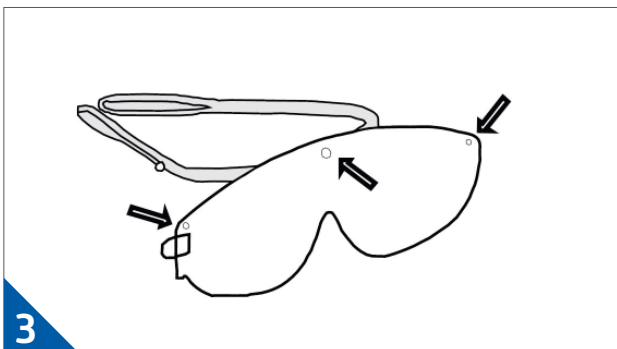

3
Klik drie gaatjes aan het bijbehorende herbruikbare frame (NONEFRAME). De resterende beschermfolie zit nu aan de buitenkant.

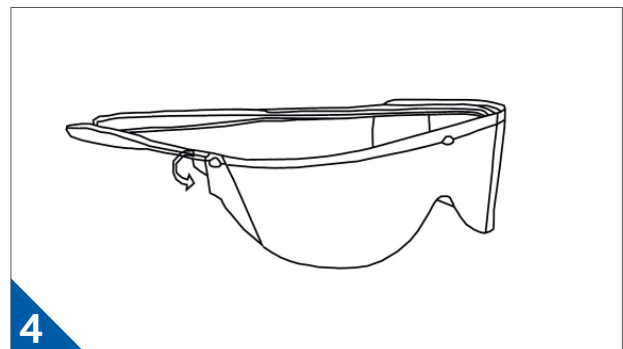

4
Verwijder de buitenste beschermfolie op dezelfde manier als in stap 2, en bevestig dan het handvat.

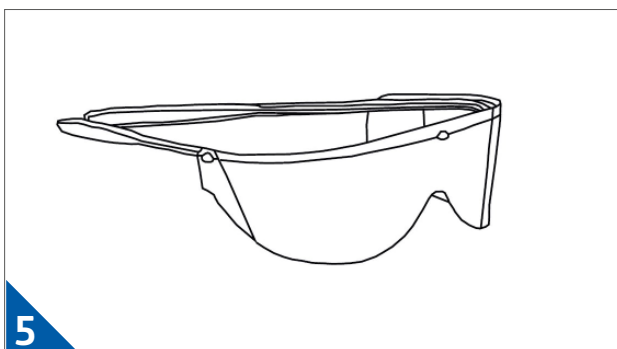

5
De bril kan nu gedragen worden en heeft geen krassen.

Opmerking: om je NONEFRAME schoon te maken of te desinfecteren, veeg je hem voorzichtig af met vloeistof met tot 70% Isopropano

Neem contact op met uw Medline account manager of
bezoek www.medline.eu/nl om meer te weten