



EasyBath®

Wärmeschrank


Modell MSCEWARMER14S und MSCEWARMER28S

- 1** Stellen Sie den Wärmeschrank an den vorgesehenen Einsatzort und vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen nicht versperrt sind. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an und schalten Sie das Gerät am Netzschalter auf der Rückseite ein.
- 2** Der Wärmeschrank ist sofort einsatzbereit. Die LEDs an der Sensorleiste leuchten erst rot und dann grün auf; sie durchlaufen einen Selbsttest, bis die aktuelle Temperatur der Kammer angezeigt wird. Der Wärmeschrank beginnt mit dem Aufheizen auf die werkseitig eingestellte Temperatur von 52 °C.
- 3** Wenn Sie die voreingestellte Temperatur ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die Taste 'P' und stellen Sie dann mit den Pfeiltasten die Temperatur ein. Um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren, drücken Sie 'P', bis Sie die Temperatur des Wärmeschranks sehen. Der Wärmeschrank arbeitet im Bereich von 38 bis 54 °C.
- 4** Legen Sie die EasyBath® Produkte in das Gerät. Es ist normal, dass die Temperatur auf dem Display sinkt, nachdem Sie neue Produkte in die Kammer gelegt haben. Die Statusanzeigen leuchten jeweils nach dem Einlegen eines EasyBath® Produkts auf. Der Wärmeschrank merkt sich die Reihenfolge, in der die Produkte eingelegt wurden.

Leuchtanzeigen

- Rotes Dauerlicht: Aufwärmvorgang läuft
- Grünes Dauerlicht: Produkt ist vollständig erwärmt und einsatzbereit
- Grünes Blinklicht: Produkt ist erwärmt und das erste Produkt in der Reihenfolge sollte entnommen werden
- Rotes Blinklicht: Produkt muss entsorgt werden, da es länger als 250 Stunden im Wärmeschrank war



 Detaillierte Anleitungen finden Sie in der Gerätebeschreibung, die der Verpackung beiliegt.