



EasyBath®

Scaldatore intelligente

Modello MSCEWARMER14S e MSCEWARMER28S

1

Posizionare l'Intelligent Warmer nello spazio dove sarà utilizzato e assicurarsi che le griglie dell'aria non siano ostruite. Collegare all'alimentazione elettrica e accendere il dispositivo usando l'apposito bottone situato sul retro del fornello.

2

L'Intelligent Warmer è pronto immediatamente per l'uso. Gli indicatori a LED sul display di controllo e i pannelli con i sensori verticali si illumineranno per un autotest fino a quando viene visualizzata la temperatura della postazione utilizzata. Il fornello inizierà a scaldare fino alla temperatura impostata di 52° C.

3

Se si vuole modificare la temperatura, seguire i seguenti passaggi. Premere una volta il pulsante "P" e utilizzare le frecce per regolare la temperatura. Per tornare alla visualizzazione originale, premere "P" fino a visualizzare la temperatura del riscaldatore. L'Intelligent Warmer funziona in un range di temperature tra i 38° e 54° C.

4

Caricamento dei prodotti EasyBath. E' normale che la temperatura mostrata sul display si abbassi dopo aver inserito nuovi prodotti negli alloggiamenti vuoti. Appena si inserirà un nuovo prodotto EasyBath, si illuminerà l'indicatore di stato. L'Intelligent Warmer ricorda la sequenza con cui sono stati aggiunti i prodotti.

Indicatori luminosi

- Luce rossa fissa: attenzione
- Luce verde fissa – Riscaldato: il prodotto è completamente riscaldato e pronto per l'uso
- Luce verde lampeggiante: caldo, prelevare per primo
- Luce rossa lampeggiante – Scartare: il prodotto è rimasto al caldo per più di 250 ore e deve essere scartato



Per ulteriori e dettagliate istruzioni, fare riferimento al manuale del dispositivo presente nella confezione.

