


# Guía de procedimiento: Jeringas de Lavado Precargadas ZR®

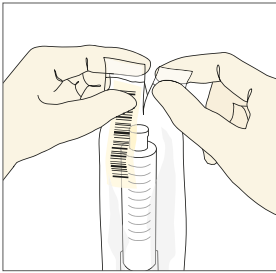


1

- Inspeccione la integridad del envase (envoltorio, jeringa y tapón de la punta).

**Nota:** No utilizar si el envase está dañado, si la jeringa tiene fugas o si el tapón de la punta no está bien colocado en la jeringa.

- Retire el envoltorio protector
- Inspeccione visualmente la jeringa y la solución


**Nota:** No utilizar si tiene un aspecto lechoso o difuso.

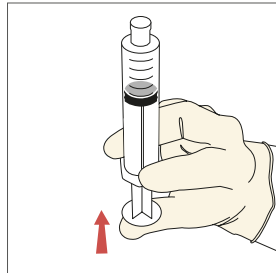

2

Antes de quitar el tapón:

- Sostenga la jeringa con el tapón de la punta en posición vertical.
- Presione el émbolo de la jeringa hasta que el émbolo se mueva ligeramente. Este movimiento rompe el sellado entre la jeringa y permite una aplicación suave de la solución.

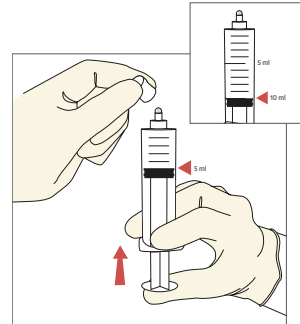


3

- Vuelva a colocar el tapón de la punta girando desde el extremo de la jeringa.

**Nota:** Tenga cuidado de no contaminar la punta de la jeringa.

- Coloque la cánula o la aguja roma, si es necesario.
- Sostenga la jeringa con el tapón hacia arriba.
- Golpee levemente para que suban las burbujas. Aplique y mantenga la presión sobre el émbolo hasta que este alcance el volumen de lavado etiquetado en la jeringa (por ejemplo, 10 ml, 5 ml, 3 ml, etc.) y se expulse el aire.

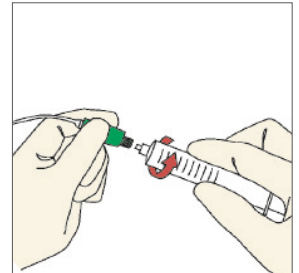

4

- Coloque la jeringa en el lugar de la inyección y lave con un volumen adecuado de solución.

**Nota:** Utilice la cantidad de solución que indica su protocolo para el lavado.

## Recuerde:

Esto se aplica únicamente a las jeringas con solución salina. El dispositivo no está destinado al campo estéril. Es de un solo uso y solo debe utilizarse para el lavado intravenoso de forma aséptica.

Siga las instrucciones de uso de Medline. Junto con el protocolo de su centro para la administración de un lavado intravenoso, utilícelo de acuerdo con las advertencias y precauciones que sean apropiadas para el medicamento que se está administrando.

No utilice esta solución si tiene dudas sobre la compatibilidad. Deseche la jeringa y las partes no utilizadas.

