


# Guide de procédure : Seringue de rinçage préremplie ZR®

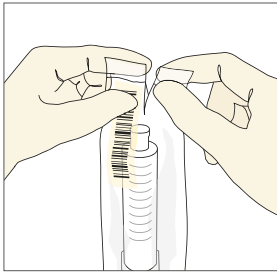


**1**

- Vérifiez l'intégrité du conditionnement (emballage, seringue et capuchon).

**Remarque :** ne pas utiliser si l'emballage a été endommagé, si la seringue fuit ou si le capuchon n'est pas correctement fixé à la seringue.


- Retirez l'emballage de protection
- Inspectez visuellement la seringue et la solution

**Remarque :** Ne pas utiliser si l'un ou l'autre est trouble ou opaque.

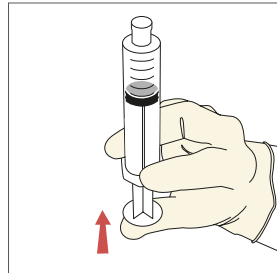

**2**

- Avant de retirer le capuchon :
- Tenez la seringue avec le capuchon vers le haut.
- Appuyez sur le piston de la seringue jusqu'à ce qu'il bouge légèrement. Ce mouvement brise le joint de la seringue et permet une application en douceur de la solution.

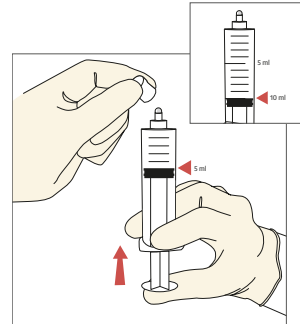


**3**

- Retirez le capuchon en le tournant à partir de l'extrémité de la seringue.

**Remarque :** veillez à ne pas contaminer l'extrémité de la seringue.

- Fixez la canule émoussée ou l'aiguille, si nécessaire.
- Tenez la seringue avec l'extrémité vers le haut.
- Tapotez le côté pour que les bulles remontent. Appliquez et maintenez la pression sur le piston jusqu'à ce que celui-ci atteigne le volume de rinçage indiqué sur la seringue (par exemple 10 ml, 5 ml, 3 ml, etc.) et que l'air soit expulsé.

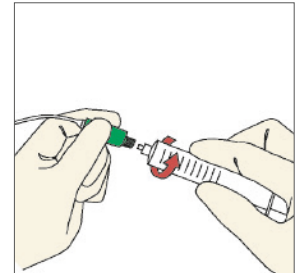

**4**

- Fixez la seringue au site d'injection et rincez le site avec un volume approprié de solution.

**Remarque :** utilisez la quantité de solution que votre protocole indique pour le rinçage.

**Remarque :**

ceci s'applique uniquement aux seringues de solution saline. Le dispositif n'est pas destiné au champ stérile. Il est à usage unique et ne doit être utilisé que pour le rinçage IV, en suivant une technique aseptique.

Suivez le mode d'emploi de Medline. En plus du protocole de votre établissement pour l'administration IV, il convient de respecter les avertissements et les précautions relatives au médicament administré.

N'utilisez pas cette solution en cas de doute sur la compatibilité. Jetez la seringue et toute pièce non utilisée.

