


# Guida all'utilizzo: ZR® Siringhe pre-riempite

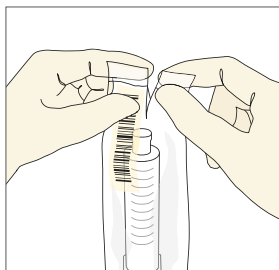


1

- Ispezionare l'integrità della confezione (involucro, siringa e tappo).

**Nota:** Non usare se la confezione è stata danneggiata, se la siringa perde liquido o se il tappo non è completamente attaccato alla siringa.


- Rimuovere l'involucro protettivo
- Ispezionare visivamente la siringa e la soluzione

**Attenzione:** Non usare se la soluzione è torbida o velata.

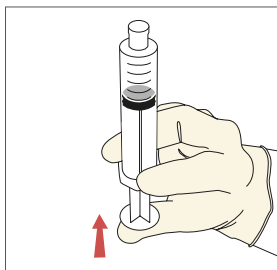

2

- Prima di togliere il tappo:
- Tenere la siringa con il tappo in posizione verticale.
- Premere lo stantuffo della siringa finché lo stantuffo non si muove leggermente. Questo movimento rompe il sigillo della siringa e permette un'applicazione fluida della soluzione.

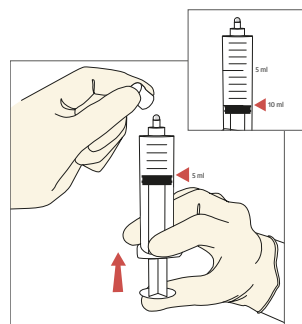


3

- Riposizionare il tappo sulla punta con una rotazione sull'estremità della siringa.

**Nota:** Fare attenzione a non contaminare la punta della siringa.

- Attaccare la cannula smussata o l'ago, se necessario.
- Tenere la siringa con la punta verso l'alto.
- Picchiettare il lato esterno per far salire le bolle. Applicare e mantenere la pressione sullo stantuffo fino a quando questo non raggiunge il volume di lavaggio indicato sull'etichetta della siringa (ad es. 10 ml, 5 ml, 3 ml ecc.) e l'aria viene espulsa.

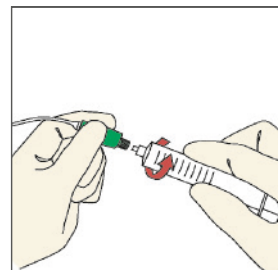

4

- Attaccare la siringa al sito di iniezione e lavare con un volume adeguato di soluzione.

**Nota:** Usa la quantità di soluzione indicata dal tuo protocollo per il lavaggio.

## Si prega di notare:

Questo vale solo per le siringhe con soluzione salina. Il dispositivo non è destinato all'utilizzo nel campo sterile. È monouso e destinato al solo lavaggio degli accessi in modo asettico.

Seguire le istruzioni d'uso di Medline. Insieme al protocollo per il lavaggio degli accessi della tua struttura, il dispositivo è da usarsi in accordo con le avvertenze e le precauzioni che sono appropriate al farmaco che viene somministrato.

Non usare questa soluzione se ci sono dubbi sulla compatibilità. Smaltire la siringa e tutte le parti inutilizzate.

