


Proceduregids: ZR® Pre-filled Flush Injectiespuit

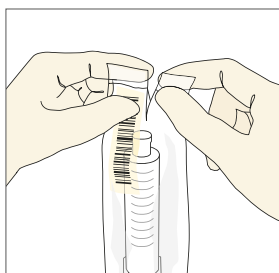


1

- Controleer het product op beschadigen (verpakking, injectiespuit en dop).

Let op: Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd, de injectiespuit lekt of de dop niet volledig is bevestigd op de spuit.

- Verwijder de verpakking
- Controleer de spuit en de oplossing.


Let op: Niet gebruiken indien één van de twee troebel of wazig is.

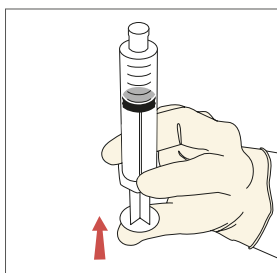

2

Voor het verwijderen van de dop:

- Houd de injectiespuit met dop rechtop.
- Druk op de zuiger totdat deze iets beweegt. Deze beweging verbreekt de verzegeling tussen de injectiespuit en zorgt voor een soepele toepassing van de oplossing.

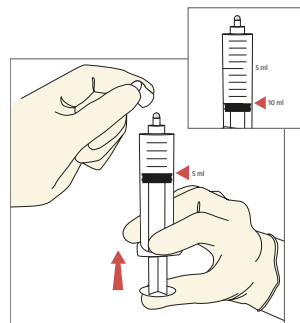


3

- Plaats de dop terug door vanaf het uiteinde van de spuit te draaien.

Let op: Zorg ervoor dat u het uiteinde van de spuit niet besmet.

- Bevestig de stompe canule of naald indien nodig.
- Houd de injectiespuit rechtop.
- Tik op de zijkant, zodat bellen naar boven trekken. Pas de injectiespuit toe en houd druk op de zuiger totdat deze het gelabelde spoelvolumen op de spuit bereikt (bijv. 10 ml, 5 ml, 3 ml enz.) en de lucht is uitgedreven.

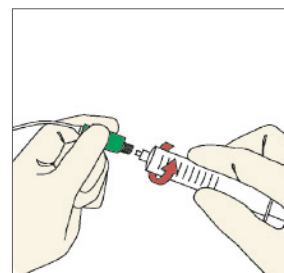

4

- Bevestig de injectiespuit aan de injectieplaats en spoel de injectieplaats door met een geschikte hoeveelheid oplossing.

Let op: Gebruik de hoeveelheid oplossing die uw protocol aangeeft voor het spoelen.



Let op:

Dit is alleen van toepassing op zoutoplossing spuiten. Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor het steriele veld. Het is een disposable product en dient alleen gebruikt te worden voor het spoelen van infusen - aseptisch.

Volg de Medline gebruikersaanwijzing. Gebruik, samen met het protocol van uw instelling voor het toedienen van een infuusspoeling, in overeenstemming met de waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen die van toepassing zijn op de medicatie die wordt toegediend.

Gebruik deze oplossing niet als u twijfelt of deze compatible is. Gooi de injectiespuit en ongebruikte onderdelen weg.