


Guia de Procedimento: Seringa Pré-cheia para lavagem ZR®

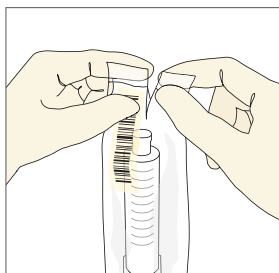

1

- Inspeção a integridade da embalagem (o embalamento, a seringa e a tampa da ponta).

Nota: Não utilizar se a embalagem estiver danificada nem se a seringa estiver a verter ou a tampa da ponta não se encontrar totalmente presa à seringa.

- Remova o material de proteção
- Inspeção visualmente a seringa e a solução


Nota: Não utilizar se, quer uma, quer outra, estiverem embaciadas ou turvas.

Nota:

Só se aplica a seringas com soro. O dispositivo não se destina a ser usado em campo estéril. É de utilização única e só deve ser usado para lavagem IV - de foram assética.

Siga as instruções de utilização da Medline. Juntamente com o protocolo da sua unidade de saúde relativo à administração de lavagem IV, utilizar de acordo com quaisquer avisos ou precauções adequadas para a medicação a ser administrada.


Não usar esta solução, se tiver dúvidas acerca da sua compatibilidade. Elimine a seringa e quaisquer componentes por usar.

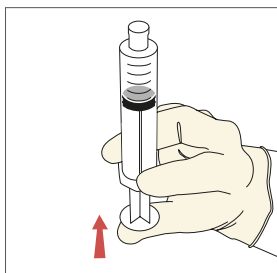

2

Antes de tirar a tampa:

- Segure a seringa com a tampa da ponta na vertical.
- Pressione o êmbolo da seringa até o êmbolo de mexer ligeiramente. Este movimento quebra o selo entre a seringa e permite uma aplicação fácil da solução.

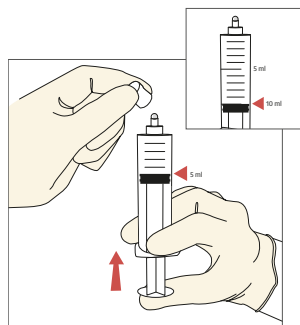


3

- Volte a colocar a tampa da ponta torcendo-a na extremidade da seringa.

Nota: Tenha cuidado para não contaminar a ponta da seringa.

- Coloque uma cânula ou agulha rombas, se necessário.
- Segure na seringa com a ponta virada para cima.
- Dê um piparote na lateral para que as bolhas subam. Aplique e mantenha pressão no êmbolo até o êmbolo chegar ao volume de lavagem marcado na seringa (por exemplo, 10 ml, 5 ml, 3 ml, etc.) e o ar ser expelido.

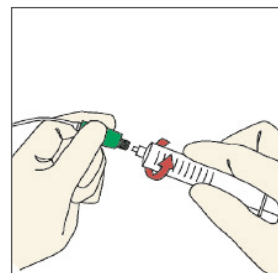

4

- Conecte a seringa ao local de injeção e irrigue o local com um volume de solução apropriado.

Nota: Use a quantidade de solução de lavagem que o protocolo indicar.

