




INSTRUCCIONES DE USO: TOALLITAS READYFLUSH®

Toallitas de limpieza individuales desechables

Limpieza después de cada episodio de incontinencia o uso para limpieza personal diaria de todas las partes del cuerpo según sea necesario.

- 1 Mantener las toallitas ReadyFlush al lado de la cama o cerca del baño.
- 2 Abrir el paquete como se indica, usar los dedos para encontrar la esquina de la toallita y tirar con cuidado para sacarla del paquete.
- 3 Limpiar todas las zonas afectadas. Al limpiar la región perianal, hacerlo de delante hacia atrás. Usar toallitas adicionales si fuera necesario.
- 4 Eliminar las toallitas ReadyFlush sucias a través del inodoro, bolsa de residuos o triturador. No formar bolas con las toallitas o intentar tirar de la cadena con mucha cantidad de toallitas.
- 5 Cerrar de nuevo el paquete después de usarlo para mantener la humedad de las toallitas.

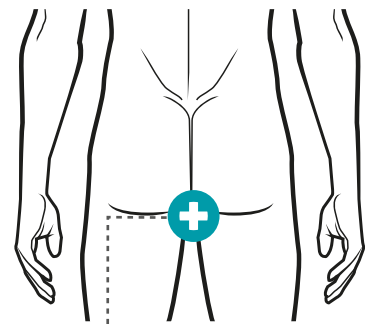

Limpiar siempre la región perianal de delante hacia atrás.



Para obtener más información sobre ReadyFlush, póngase en contacto con su delegado comercial de Medline o visite www.medline.eu/es